

*SANGIs original Hydroxyapatit, entwickelt in 1980

Hochkonzentrierte Hydroxyapatit Zahnschmelz-restaurierende Paste, sowohl zur professionellen Anwendung als auch zur häusliche Pflege durch den Patienten auf Empfehlung des Zahnarztes.



SANGI since 1980

■ Verwendungszweck

APAPRO Zahnschmelz-restaurative, Hydroxyapatit-haltige professionelle Pflege-Crème ersetzt Mineralien die aus der Schmelzoberfläche verloren gehen (mikroskopische Oberflächenrisse und Untergrundläsionen) während klinischen Eingriffen wie mechanischer Zahnreinigung (PMTC), Bleichen und kieferorthopädischen Arbeiten.

Zur Verwendung mit einem Gumminapf oder einem ähnlichen sanften Poliergerät oder in einer Zahnschiene.

- nach PMTC
- nach Zahnsteinentfernung
- nach Bleichen
- nach der Entfernung von Zahnspangen
- für allgemeinen Schutz und Pflege

■ Lagerung

Kappe nach Gebrauch wieder fest verschließen und an einem kühlen, sauberen Ort aufbewahren.

■ Hinweise zur Anwendung

- 1) Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die äußere Oberfläche der Tube nicht beschädigt ist.
- 2) Sollte der Patient nach der Verwendung dieses Produkts Anzeichen einer Weichteilreizung aufweist, stellen Sie die Verwendung ein.
- 3) Da es sich bei diesem Produkt um eine Paste zur dentalen Anwendung handelt, achten Sie darauf dass diese nicht verschluckt wird

EU_APP191015



SANGI Europe GmbH

Im Niederfeld 6 Eppertshausen D-64859

✉ info@sangi-eu.com

URL www.sangi-eu.com

■ Anleitung zur Anwendung

1. Auftragen mit einem Gumminapf

- 1 Drücken Sie die Paste in eine Schale.
- 2 Bringen Sie einen Gumminapf an ein zahnärztliches Handstück an.
- 3 Nehmen Sie eine kleine Menge der Paste mit dem Gumminapf auf (vor Rotation).
- 4 Verteilen Sie die Paste über die Zahnoberfläche (ebenfalls vor Rotation). Es ist besser eine kleine Menge Paste auf jeden Zahn separat aufzutragen als sie über einen weiten Bereich auf einmal zu verteilen.
- 5 Rotieren Sie den Gumminapf und reiben Sie die Paste sanft über gesamte Zahn, mit Konzentration vor allem auf Bereiche wo Plaque und Flecken leicht anhaften können (zervikale und proximale Flächen). Die Drehzahl sollte 500 bis 750 U / min betragen. Verbleiben Sie auf jedem Zahn 5 bis 10 Sekunden bei langsamer Rotation des Gumminapfes.




PUNKT 1

Entfernen Sie Plaque und Flecken vollständig, um eine saubere Zahnoberfläche vor der Behandlung zu gewährleisten.



PUNKT 2

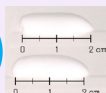

Für den allgemeinen Gebrauch 1-2 g APAPRO (ca. 1-2 cm Streifen) jeweils auf das obere und untere Gebiss auftragen.



PUNKT 3

Bewegen Sie den Gumminapf vorsichtig und ohne Druck, als würden Sie einen Saugnapf auf die Zähne setzen.

** Der Napf ist sehr weich und die Paste verteilt sich leicht auf den Zähnen.*

2. Anwendung in einer Zahnschiene

- 1 Für den Heimgebrauch stellen Sie den Patienten mit einer maßgefertigten Zahnschiene und einer Tube APAPRO Remineralisierende Pflege-Crème aus, sowie Anweisungen für die regelmäßige Anwendung, idealerweise Abends für jeweils 5 Minuten nach dem Zähneputzen vor dem Schlafengehen.
- 2 Der Patient sollte 1-2 g APAPRO in der personalisierten Zahnschiene verteilen und diese für 5 Minuten fest auf die Zähne setzen. Danach den Mund leicht mit Wasser ausspülen.

